

OneTouch Reveal[®] Mobile App


In Verbindung mit dem
OneTouch Ultra Plus Reflect[®]
Blutzuckermessgerät





Wenn Sie Ihr **OneTouch Ultra Plus Reflect®** Blutzuckermessgerät mit der **OneTouch Reveal®** Mobile App verbinden, gibt Ihnen der **Blutzucker-Mentor** viele weitere wertvolle Informationen und Hinweise, um Sie zu unterstützen, Ihren Diabetes besser unter Kontrolle zu haben.*

Informationen zur Einrichtung und Verwendung der OneTouch Reveal® Mobile App erfahren Sie in diesem Video

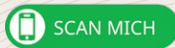

* Therapieentscheidungen müssen sich nach dem absoluten gemessenen Wert und den ärztlichen Empfehlungen richten.



Die OneTouch Reveal®
Mobile App erstellt eine
Zeitleiste von wichtigen
Blutzuckermessergebnissen
und Aktivitäten und hebt her-
vor, wann Ihre Werte wieder-
holt ober- oder unterhalb der
Bereichsgrenzwerte lagen.



Die OneTouch Reveal® Mobile App mit der **ColourSure® Technology** organisiert Ihre Blutzuckermessergebnisse automatisch in einem farbkodierten Tagebuch und Dashboards, die mit Ihren erfassten Angaben zu Mahlzeiten, Insulin und Bewegung verknüpft sind.

ColourSure®

PLUS



Erhalten Sie auf einen Blick **eine Übersicht** Ihrer Blutzuckermesswerte für **14, 30 und 90** Tage.



Teilen Sie Ihre Blutzucker-
messergebnisse ganz einfach
mit Ihrer Familie oder Ihrem
betreuenden Arzt.

Vernetzen Sie sich mit dem
Praxiskonto Ihres Arztes, damit
Ihr Arzt Ihren Fortschritt sehen
kann. Fragen Sie nach dem
Praxiscode und tragen Sie
diesen in Ihr OneTouch Reveal®
Konto ein.

Voraussetzung ist eine
Registrierung in der OneTouch
Reveal® Web-Anwendung
seitens Ihres Arztes.

Tragen Sie den **Praxiscode** hier
ein, um eine Aufzeichnung für
sich zu behalten:



Mit der **Fortschrittskontrolle** können Sie sich persönliche Ziele setzen und Ihre Fortschritte im Zeitverlauf beobachten.



Kostenloser App-Download

Hier
herunterladen



kontakt@onetouch.de



0800 70 77 007

Mo. - Fr. 08:00-17:00 Uhr

Registrieren Sie Ihr OneTouch Ultra Plus Reflect® - Messgerät noch heute unter www.onetouch.de

iOS ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Apple Inc. App StoreSM ist eine Servicemarke der Apple Inc.

AndroidTM und Google Play sind Marken der Google Inc.

Die Wortmarke Bluetooth[®] und die entsprechenden Logos sind eingetragene Schutzmarken von Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung dieser Marken durch LifeScan Scotland Ltd. und ihre Tochterunternehmen erfolgt unter einer Lizenz. Weitere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© 2020-2022 Lifescan IP Holdings, LLC

ONETOUCH[®]

DE-DMV-2000014



P266 022-2022 (04/22) 15A