

ONETOUCH

Ultra *Plus* Reflect



Willkommen.
Fangen wir an.



Erste Schritte mit Ihrem OneTouch Ultra Plus Reflect® Messgerät

Bevor Sie das OneTouch Ultra Plus Reflect® Messgerät in Betrieb nehmen, um Ihre Blutzuckerwerte zu testen, sollten Sie die Gebrauchsanweisung und die Kurzanleitung sorgfältig lesen, welche in der Produktverpackung enthalten sind.



- | | | | |
|---|-----------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Teststreifen-einschub | 6 | Zurück-Taste |
| 2 | Bluetooth-Symbol | 7 | Auf- und Abwärtstasten |
| 3 | Maßeinheit (mg/dL) | 8 | Farbige Bereichsanzeige |
| 4 | Micro-USB-Datenausgang | 9 | Symbol der Bereichsanzeige |
| 5 | Ein- & ausschalten/OK-Taste | 10 | Test Tracker |

So schalten Sie das Messgerät ein:



Schritt 1

Drücken Sie zum Einschalten des Messgerätes die OK-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis der Begrüßungsbildschirm angezeigt wird. Lassen Sie die Taste anschließend los. Das Messgerät lässt sich auch einschalten, indem Sie einen Teststreifen einführen.



Schritt 2

Auf dem Messgerät wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie die Ersteinrichtung mit der OneTouch Reveal® App vornehmen möchten.



Schritt 3

Sie werden zur Eingabe von Sprache, Uhrzeit und Datum aufgefordert. Markieren Sie die Elemente durch Drücken der Auf- und Abwärtstasten und speichern Sie Ihre Eingabe durch Drücken der OK-Taste.



Schritt 4

Sie können auch Ihre Bereichsgrenzen, Ihr tägliches Testziel und Ihren 90-Tage-Zieldurchschnitt eingeben.*



Schritt 5

Auf dem Bildschirm wird **Einrichtung abgeschlossen** angezeigt. Ihr Messgerät ist nun betriebsbereit.



Schritt 6

Drücken Sie zum Ausschalten des Messgerätes die OK-Taste und halten Sie sie einige Sekunden gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist. Sie können es auch ausschalten, indem Sie den Teststreifen entfernen oder es zwei Minuten inaktiv lassen.


* Besprechen Sie unbedingt mit dem medizinischen Fachpersonal, das Sie betreut, welche Einstellungen für Sie richtig sind.

So führen Sie eine Blutzuckermessung durch:



Schritt 1

Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

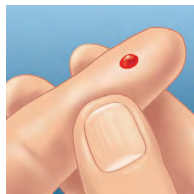

Schritt 4

Drücken Sie den Auslöseknopf. Entfernen Sie die Stechhilfe von Ihrem Finger. Drücken Sie sanft auf Ihren Finger, bis ein Blutropfen erscheint.




Schritt 2

Schalten Sie das Messgerät ein, indem Sie einen Teststreifen in den Teststreifeneinschub einführen. Die blau-goldene Seite des Teststreifens muss dabei nach oben zeigen und die beiden silbernen Zinken müssen in den Teststreifeneinschub eingeführt werden.




Schritt 5

Tragen Sie den Blutropfen auf den Teststreifen auf (egal an welcher Seite). Halten Sie das Messgerät leicht schräg und führen Sie den goldenen Kanal im Teststreifen zum Blutropfen.

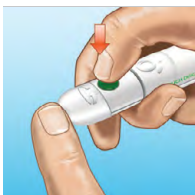

Schritt 3

Justieren Sie die Tiefeneinstellung an der Stechhilfe. Punktieren Sie Ihren Finger, indem Sie das Gerät fest an die Seite Ihres Fingers halten.*

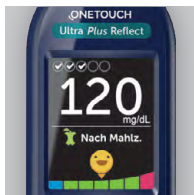

Schritt 6

Das Messgerät teilt Ihnen sofort mit, ob das aktuelle Ergebnis in, über oder unter Ihren Grenzbereichen liegt. Außerdem zeigt es an, ob sich der Wert dem oberen oder unteren Grenzwert Ihres Zielbereiches nähert.


* Nutzen Sie für jede Messung eine neue, sterile Lanzette.



Der **Blutzucker-Mentor** bietet personalisierte Empfehlungen, schafft Verständnis und stärkt die Motivation, um Sie dabei zu unterstützen, Über- und Unterzuckerungen vermeiden zu können.*



Die **dynamische ColourSure® Bereichsanzeige** macht Sie darauf aufmerksam, wenn sich Ihr Blutzucker einem der Grenzwerte annähert, damit Sie ganz souverän reagieren und somit Über- und Unterzuckerungen vermeiden können.*

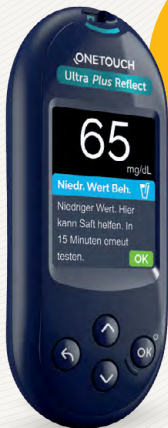

Das einzige Messgerät mit
**Blood Sugar
Mentor®**


* Therapieentscheidungen müssen sich nach dem absoluten gemessenen Wert und den ärztlichen Empfehlungen richten.

* Treffen Sie keine unmittelbaren Behandlungsentscheidungen nur anhand der Bereichsanzeige. Behandlungsentscheidungen müssen sich nach dem absoluten gemessenen Wert und den ärztlichen Empfehlungen richten und dürfen nicht allein danach getroffen werden, in welchem Bereich das Messergebnis liegt.



Verbindung mit **OneTouch Reveal®**
App, die bereits über 1.000.000
Downloads weltweit erreicht hat.*

Hier herunterladen:

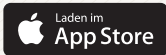

* Interner weltweiter Dashboard-Bericht für die
OneTouch Reveal-App, Juni 2018

Apple, App Store und das Apple-Logo sind Marken
der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen
Ländern. Google Play und das Google Play-Logo sind
Marken der Google LLC. Die Wortmarke Bluetooth®
und die entsprechenden Logos sind eingetragene
Schutzmarken von Bluetooth SIG, Inc. Jede
Verwendung dieser Marken durch LifeScan Scotland
Ltd. und ihre Tochterunternehmen erfolgt unter einer
Lizenz. Weitere Marken und Handelsnamen sind
Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Die Wortmarke Bluetooth® und die entsprechenden Logos
sind eingetragene Schutzmarken von Bluetooth SIG,
Inc. Jede Verwendung dieser Marken durch LifeScan
Scotland Ltd. und ihre Tochterunternehmen
erfolgt unter einer Lizenz. Weitere Marken
und Handelsnamen sind Eigentum
der jeweiligen Inhaber.

Besuchen Sie OneTouch.de
oder kontaktieren
Sie den OneTouch®
Kundenservice



www.onetouch.de



kontakt@onetouch.de



0800 70 77 007

Mo.-Fr.: 08:00-17:00 Uhr

Registrieren Sie Ihr OneTouch
Ultra Plus Reflect® - Messgerät noch
heute unter www.OneTouch.de

© 2020-2022 LifeScan IP Holdings, LLC – DE-UPR-2000053

ONETOUCH®